


## Swift™ FX

NASENPOLSTER-MASKE

### Komponentenkarte

**Gesamtsystem (verschiedene Größen)**  
S\* / M\* / L\*

**Artikelnummer**  
61501

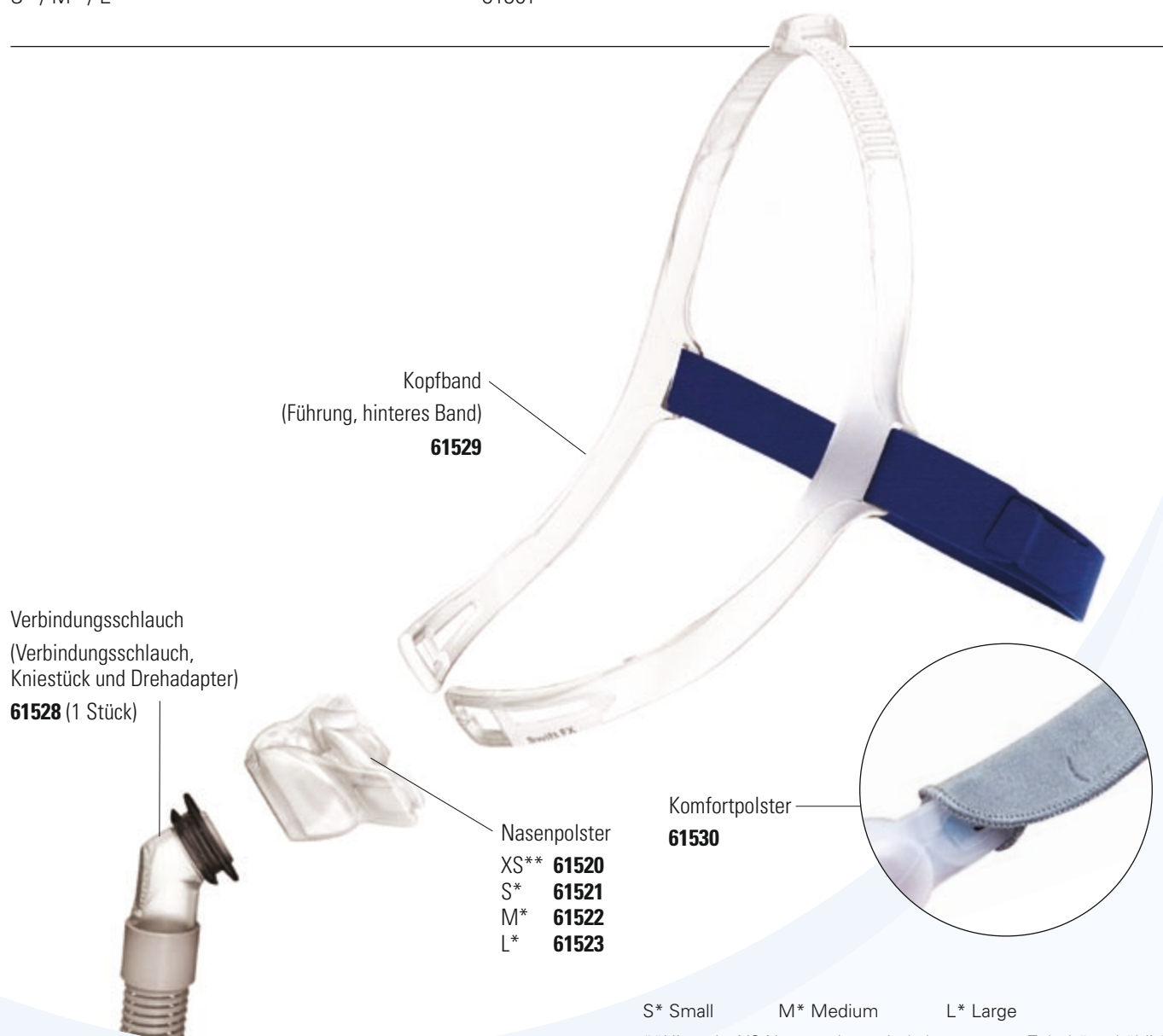

S\* Small      M\* Medium      L\* Large

\*\*Hinweis: XS Nasenpolster sind als separates Zubehör erhältlich

## Swift™ FX

NASENPOLSTER-MASKE

### Anpassungsleitfaden



1

- Setzen Sie die Nasenpolster an der Nase an und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.
- Das Kopfband sollte zwischen Augen und Ohren verlaufen.



2

- Stellen Sie zuerst das obere Kopfband ein.
- Ziehen Sie Rille für Rille.
- Nicht zu fest anziehen.



3

- Passen Sie das hintere Kopfband zur Feineinstellung an.
- Nicht zu fest anziehen.
- Das hintere Kopfband kann oberhalb oder unterhalb der Haare verlaufen.



4

- Swift FX Nasenpolster bieten natürlichen Sitz von Anfang an.
- Kleinere Korrekturen der Position können helfen, die angenehmste Position zu finden.



5

- Verbinden Sie den kurzen Maskenschlauch mit dem Atemschlauch des Gerätes.
- Swift FX ist nun angepasst und einsatzbereit.



TIP

- Prüfen Sie, ob sich die Nasenposter vollständig entfaltet haben, nachdem Sie das Gerät gestartet haben. Ziehen Sie die Nasenpolster hierfür leicht vom Gesicht weg und und setzen Sie sie erneut unter die Nase.



#### KOMFORTPOLSTER (OPTIONAL VERWENDBAR)

- Platzieren Sie die beiden Komfortpolster über der seitlichen Führung des Kopfbandes. Achten Sie darauf, dass der Verschluss von oben kommend nach außen weist.
- Die Komfortpolster sollten auf Höhe der Wangenknochen über das Kopfband führen, um maximalen Komfort zu gewährleisten.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.