

## Zusatzinformationen Gebrauchsanweisung AirFitP10 und AirFitP10 for Her Nasenpolstermaske

### Verwendung der Maske:

Die Maske kann mit allen Geräten mit positivem Atemwegsdruck (zum Beispiel mit CPAP- und Bilevel-Geräten), die über ein vorgeschriebenes Ausatemventil und einen Schlauchanschluss gemäß ISO 5356-1 (22mm) verfügen, verwendet werden. Bitte schauen Sie für Details über Druckeinstellungen in der Gebrauchsanweisung für Ihr Gerät nach und konsultieren Sie einen Arzt oder ResMed-Vertreter bezüglich der Therapieeinstellungen.

Wenn Sie Ihre Maske mit CPAP- oder Bilevel-Geräten von ResMed verwenden, die über Maskenoptionen verfügen, lesen Sie sich dazu bitte den Abschnitt „Technische Daten“ in dieser Gebrauchsanweisung durch.

Mehr Informationen über die Kompatibilität von Masken und ResMed-Geräten finden Sie hier:

<http://www.resmed.de/patienten/service-unterstuetzung/masken-geraetekompatibilitaet>

Wenn Sie keinen Internetanschluss haben, wenden Sie sich bitte an Ihren ResMed-Vertreter.

### Lebensdauer:

Sofern dieses Maskensystem bestimmungsgemäß verwendet und täglich gereinigt und gepflegt wird, beträgt die minimale Nutzungsdauer 90 Tage. Eine weitergehende Nutzung ist von einigen Faktoren abhängig: Pflege, Nutzungsintensität und Umweltbedingungen. Die Komponenten können gemäß den Kriterien für die Sichtprüfung von Produkten, beschrieben im Abschnitt „Reinigung der Maske zu Hause“ in dieser Gebrauchsanweisung ausgetauscht werden, wenn der Nutzer es für notwendig erachtet.

### Komponenten / Material

Komponenten	Material
Nasenpolster	Nasenpolster: Silikon-Elastomer Clip: Polyamid
Kopfband	20% Elasthan 80% Polyamid
Rahmensystem	Rahmen: Polypropylen  Ausatemöffnung: Polypropylen  Maskenschlauch: Thermoplastisches Elastomer (TPE)  Stabilisator: Thermoplastisches Elastomer (TPE)  Anschluss: Polycarbonat  Anschlussadapter: Polypropylen

