

Anpassen der AirFit N10 Nasenmaske



- Stellen Sie sicher, dass die graue Außenseite des Kopfbandes mit dem AirFit N10 Logo nach außen zeigt.
- Öffnen Sie die unteren Bänder und richten Sie den Unterrand des Maskenkissens mit dem unteren Bereich der Nase aus.



- Setzen Sie das Maskenkissen auf die Nase.
- Halten Sie die Maske an Ihr Gesicht.
- Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.



- Führen Sie die unteren Bänder unterhalb der Ohren entlang nach vorne und bringen Sie die Kopfband-Clips außen am Rahmen an.



- Öffnen Sie die Verschlüsse an den oberen Kopfbändern.
- Ziehen Sie die Bänder gleichmäßig an, bis die Maske bequem genau unter der Nase sitzt. Bringen Sie anschließend die Verschlüsse wieder an den oberen Kopfbändern an.

TIPP: Das Anziehen der oberen Kopfbänder ist entscheidend für die Abdichtung und den bequemen Sitz. Achten Sie darauf, diese nicht zu fest anzuziehen.



- Öffnen Sie die Verschlüsse an den unteren Kopfbändern. Ziehen Sie die Bänder gleichmäßig an, bis die Maske gut sitzt und schließen Sie anschließend die Verschlüsse wieder.
- Schließen Sie den Maskenschlauch an den Atemschlauch des Geräts an.

TIPP: Die unteren Kopfbänder müssen nur leicht angezogen werden, um einen bequemen Sitz der Maske zu erreichen.



- Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie die Luftzufuhr.
- Passen Sie den Sitz des Maskenkissens und der Kopfbänder an, bis die Maske bequem auf der Nase sitzt und weder geknickt noch verdreht ist.
- Ihre Maske ist jetzt einsatzbereit.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



Zusätzliche Optionen

- Die AirFit N10 Nasenmaske ist so gestaltet, dass die unteren Kopfbänder über oder unter dem Haar getragen werden können.
- Zusätzlich können die optionalen Komfortpolster am Rahmen angebracht werden, um den Tragekomfort im Bereich der Wangen zu erhöhen.


Tipps für die Auswahl der richtigen Größe und das Anpassen der AirFit™ N10 Nasenmaske

Mit der AirFit N10 wurde eine kompakte Nasenmaske entwickelt, die herausragenden Therapiekomfort und optimale Benutzerfreundlichkeit kombiniert. Das spezielle Design sorgt für eine einzigartig leichte und bequeme Abdichtung sowie uneingeschränkte Sicht dank des unterhalb der Augen verlaufenden Rahmens.



Größenbestimmung der AirFit N10 Nasenmaske

Wir empfehlen die Nutzung der Anpassungsschablone zur Bestimmung der Größe des Maskenkissens.

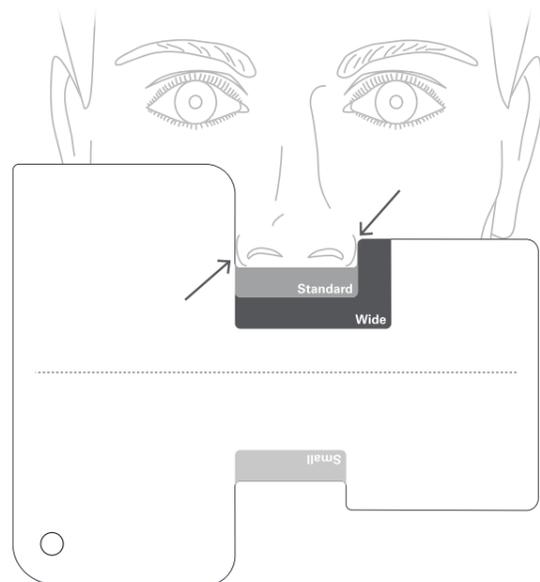

Drei Kissengrößen

Die AirFit N10 Nasenmaske ist in drei Kissengrößen erhältlich: Small, Standard und Wide.




Die Standardgröße ist für die meisten Männer geeignet; manchen Patienten passt jedoch möglicherweise das Maskenkissen in der Größe »Small« oder »Wide« besser. Das Maskenkissen in der Größe »Small« ist für die meisten Frauen gut geeignet.

Position des Maskenkissens

Das Maskenkissen der AirFit N10 Nasenmaske sitzt tiefer auf der Nase als das Maskenkissen der Mirage™ FX.

Dadurch wird das Sichtfeld des Patienten verbessert und der Abdichtungsbereich befindet sich weniger nah an den Augen. Für einen korrekten Sitz sollte das Maskenkissen so sitzen, dass sein Gewicht gleichmäßig auf die Nase des Patienten verteilt ist.

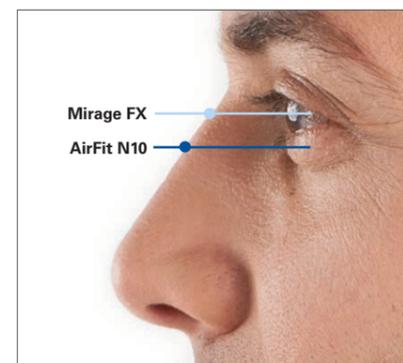


Position des Kopfbandes

Für die AirFit N10 Nasenmaske sind zwei Kopfbandgrößen erhältlich: Standard und Small. Unabhängig von der gewählten Größe sollte die Aussparung im Nackenbereich des Kopfbandes am Oberrand des Nackens verlaufen.



Optimale Abdichtung

Das Maskenkissen der AirFit N10 Nasenmaske bläst sich auf und sorgt so für eine optimale Abdichtung. Achten Sie darauf, die Kopfbänder nicht zu stramm anzuziehen.

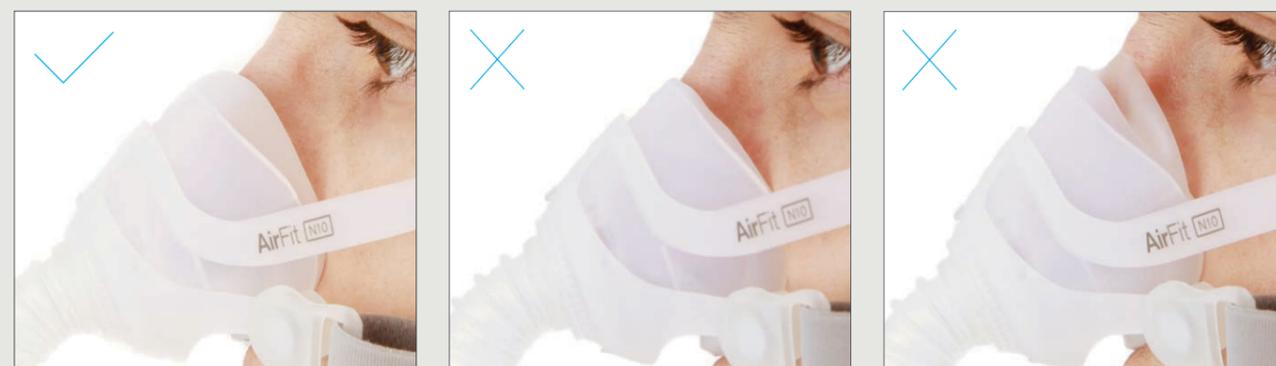

• Die Einstellung der oberen Kopfbänder ist entscheidend für Abdichtung und bequemen Sitz. Diese sind so konstruiert, dass sie stabil sitzen und nicht eng angezogen werden müssen.

• Die unteren Kopfbänder sorgen für zusätzliche Abstützung und Stabilität und sollten daher nur leicht angezogen werden.

Tipps für die Anpassung

Falls nicht sofort eine leichte und bequeme Abdichtung erreicht wird, können die vier folgenden einfachen Schritte für Abhilfe sorgen:



1. Lockern Sie bei eingeschaltetem Gerät und mit der Maske auf der Nase die Verschlüsse der unteren Kopfbänder so weit wie möglich und lockern Sie anschließend die Verschlüsse der oberen Kopfbänder. Falls erforderlich, positionieren Sie das Maskenkissen neu.
2. Achten Sie darauf, dass der hintere Teil des Kopfbandes am Oberrand des Nackens verläuft.
3. Ziehen Sie die oberen Kopfbänder nur so weit vorsichtig fest, bis keine Undichtigkeit mehr an der Nase besteht.
4. Ziehen Sie anschließend die unteren Kopfbänder vorsichtig fest, um eine sanfte und sichere Abdichtung zu erreichen.