

GEBRAUCHSANLEITUNG
UltraLite Max - UltraLite Mini
Classic 19 CPAP - Classic 15 CPAP

SYMBOLE AUF DER VERPACKUNG

	Beachten Sie die Warn- und Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung.		Hersteller
	Gebrauchsanleitung beachten		Herstellungsdatum
	Produkt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		Artikelnummer
	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb, Lagerung und Transport		Chargenbezeichnung
	Produkt ist nur für den Gebrauch durch einen einzelnen Patienten vorgesehen		CE-Zeichen des Herstellers
	Zulässige Lagertemperatur.		

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch des Schlauchs vollständig und sorgfältig durch.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den späteren Gebrauch auf.
- Fassen Sie den Schlauch immer an den Manschetten an, um ihn mit Atemtherapiegerät, Anfeuchter oder der Maske zu verbinden bzw. zu trennen.
- Der Schlauch darf nicht erwärmt ($> 60\text{ °C}$) oder sterilisiert werden.
- Der Schlauch darf nur von einem Patienten verwendet werden.
- Der Schlauch darf nach dem Waschen nicht mit einem (Mikrowellen-) Ofen, einem Haartrockner oder anderen Geräten getrocknet werden. Beachten Sie die Reinigungsanleitung.
- Die Innenseite des Schlauches darf nicht mit Bürsten oder Gegenständen gereinigt werden, da der Schlauch dadurch beschädigt werden kann.
- Nehmen Sie den Schlauch nicht auseinander und beschädigen Sie ihn nicht.
- Es dürfen keine Gegenstände in die Öffnung des Schlauches eingeführt oder hineinfallen gelassen werden, da dadurch der Schlauch beschädigt werden kann.
- Es dürfen keine Gegenstände auf den Schlauch gelegt werden, da er dadurch beschädigt werden kann.

- Wenn der Schlauch beschädigt (Löcher, Falten, Risse, usw.) oder nicht mehr funktionstüchtig ist, versuchen Sie nicht, den Schlauch selbst zu reparieren. Ersetzen Sie stattdessen den Schlauch unverzüglich.
- Der Schlauch sollte nicht länger als 12 Monate eingesetzt werden und ist nach Ablauf dieser Zeit zu ersetzen.
- Kennzeichnen Sie den alten Schlauch so, dass er bis zur endgültigen Entsorgung nicht durch einen anderen Patienten genutzt wird.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Der Schlauch ist für den Gebrauch mit Atemtherapiegeräten und Anfeuchtern mit konischen ISO Konnektoren (ISO 5356) bestimmt.

Der Schlauch ist für den Transport von Beatmungsluft vom Atemtherapiegerät oder Anfeuchter zum Patienten vorgesehen.

Der Schlauch ist für die nicht-invasive Atemtherapie im häuslichen Bereich, im Krankenhaus oder im Schlaflabor vorgesehen und kann auch bei einer zusätzlichen Sauerstoffzufuhr eingesetzt werden.

Der Schlauch darf nur von erwachsenen Patienten verwendet werden.

REINIGUNG

WARNHINWEISE

- Benutzen Sie zur Reinigung des Schlauches keine scharfen Seifen, Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Alkohol.
- Reinigen Sie den Schlauch nicht in der Spülmaschine.

Reinigen Sie den Schlauch täglich. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Waschen Sie den Schlauch in lauwarmem mildem Seifenwasser.
2. Spülen Sie den Schlauch mit sauberem Wasser aus.
3. Hängen Sie den Schlauch mit beiden Manschetten nach unten auf.
4. Lassen Sie den Schlauch vollständig trocknen.

TECHNISCHE DATEN

Schlauch	Länge	Innendurchmesser	Schlauchstandards	Widerstand bei Nenndurchfluss
Standard CPAP tubing HUE19###GT0SSG## HUN19###GT0SSG## HUE19###GT0016##	Max. 1.8m	19mm	ISO 5367:2000	≤ 0.2 kPa (2 cm H ₂ O) @ 60 l/min
UltraLite MAX HUN19###WT0SSW## HUN19###BT1SSW##	Max. 2.4m	19mm	ISO 5367:2000	≤ 0.2 kPa (2 cm H ₂ O) @ 60 l/min
Classic 15 HUN15###GT0SSG##	Max. 1.8m	15mm	ISO 5367:2000	≤ 0.2 kPa (2 cm H ₂ O) @ 60 l/min
UltraLite MINI HUN15###WT0SSW## HUN15###BT1SSW## HUN15###WT0SRW##	Max. 2.4m	15mm	ISO 5367:2000	≤ 0.2 kPa (2 cm H ₂ O) @ 60 l/min

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur + 5 °C ... + 30 °C

Relative Feuchtigkeit 5 % ... 95 %

Lager- und Transportbedingungen

Lagertemperatur 20 °C ... + 60 °C

Relative Feuchtigkeit 5 % ... 95 %

Lagerbedingungen Der Schlauch sollte in der Originalverpackung transportiert und gelagert werden und ist vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

ENTSORGUNG



Der Schlauch, die Verpackung sowie die Gebrauchsanleitung können im normalen Hausmüll entsorgt werden.

HERSTELLERGARANTIE

Der Hersteller gewährt keine Garantie und Gewährleistung wenn:

- Eingriffe, Veränderungen, Erweiterungen, Justierarbeiten, Reparaturen und Wartungsarbeiten durch nicht ermächtigte Personen durchgeführt werden,
- Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die von anderen Herstellern stammen und nicht für die Anwendung am Produkt freigegeben sind,
- das Produkt in anderer Weise als in der Gebrauchsanleitung beschrieben verwendet wird,
- Verschleißteile abgenutzt sind,
- Schäden am Produkt durch höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag) entstehen oder die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Hygiene- und Reinigungsvorschriften nicht eingehalten werden.

Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt.