


DAS ANTI-ASPHYXIE-VENTIL


Das Anti-Asphyxie-Ventil ist für den Gebrauch mit CPAP-, Bilevel- und Auto-setting-Systemen von ResMed vorgesehen. Kommt es zu einer Fehlfunktion des Luftstromgenerators, zum versehentlichen Herausziehen der Luftschläuche oder zum Stromausfall, zieht sich die Membran im Ventil zurück und der Patient kann durch die Luftauslassöffnungen Zimmerluft einatmen.

Die Anti-Asphyxie-Ventilmembran ist nur für den Gebrauch durch einen einzelnen Patienten vorgesehen und muss alle sechs Monate ersetzt werden.


VENTILTEILE

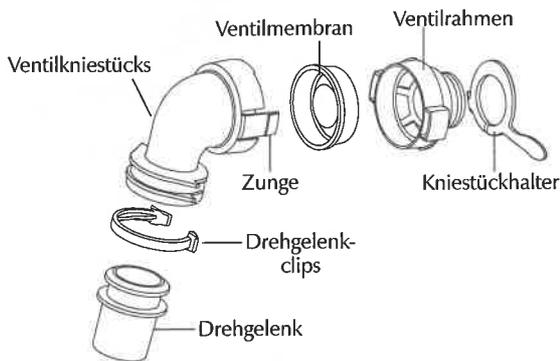


ABNEHMEN DES VENTILS

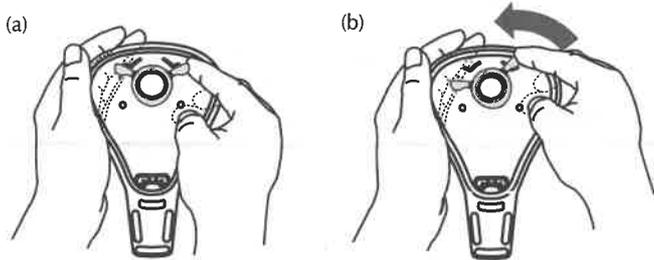

Drücken Sie den rechten Flügel des Kniestückhalters von der Innenseite des Maskenhalters (a) über die rechte L-förmige Leiste am Maskenhalter (b).

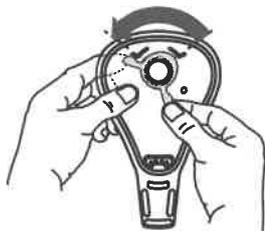


Drehen Sie den Kniestückhalter in die gezeigte Position.

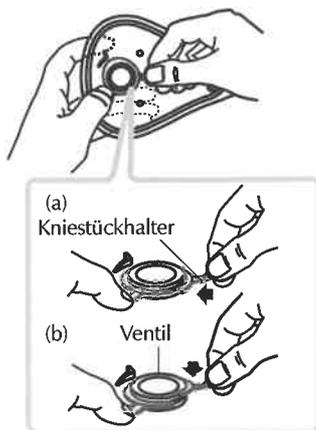

Um den Kniestückhalter abzunehmen, halten Sie einen Flügel des Kniestückhalters herunter. Ziehen Sie den anderen Flügel kräftig heraus (a) und dann nach oben (b) über das Ventil. Nehmen Sie den Kniestückhalter und das Ventil vom Maskenhalter ab.

AUSEINANDERBAUEN DES VENTILS

Entfernen Sie den Clip des Drehgelenks mit dem Daumen vom Kniestück des Ventils. Dadurch wird das Kniestück vom Ventil gelöst. Drücken Sie die Laschen des Ventilkniestücks zusammen, um das

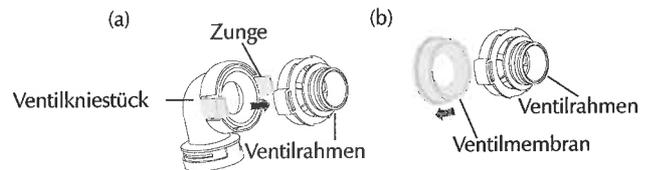


Kniestück vom Ventilrahmen abzunehmen (a). Nehmen Sie die Ventilmembran vorsichtig aus dem Ventilrahmen heraus (b).

ZUSAMMENBAU DES VENTILS

- Schieben Sie die Ventilmembran vorsichtig in das Kniestück des Ventils hinein. Stellen Sie sicher, dass sie gleichmäßig und flach um den Rand des Ventilkniestücks aufliegt, da sie andernfalls ein Geräusch erzeugt, während Sie atmen.
- Schieben Sie den Ventilrahmen über die Laschen des Ventilkniestücks, bis sie einrasten.
- Legen Sie das Drehgelenk in das Ende des Ventilkniestücks ein und sichern sie es mit Hilfe der Drehgelenkclips.

ANSCHLIESSEN DES VENTILS

Setzen Sie das Ventil in den Maskenhalter ein. Halten Sie dabei den Maskenhalter und das eingesetzte Ventil fest zusammengedrückt.

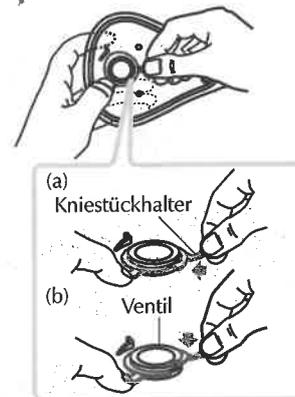

Um das Kniestück anzubringen, legen Sie eine Seite des Kniestückhalters in die Rille des Ventils. Halten Sie einen Flügel des Kniestückhalters niedergedrückt (a) und drücken Sie danach den anderen Flügel herunter, bis der Kniestückhalter vollständig einrastet (b).

Drehen Sie den Kniestückhalter in seine ursprüngliche Position. Löst es sich danach immer noch, wenn Sie daran ziehen, müssen Sie unter Umständen den Kniestückhalter gegen einen neuen austauschen.

REINIGUNG DES VENTILS

Anweisungen zur Reinigung und Desinfizierung finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrer Maske.